

使用安全注意事项

(福而必® FRP)


安全注意事项	
 警告	错误操作的话, 有可能引起事故导致死亡, 重伤或物品损坏的潜在危险。
 注意	错误操作的话, 有可能引起事故导致轻伤或者轻微物品损坏的潜在危险。

标志的意思	
	禁止行为 (禁止)
	必须实施 (强制)

 **警告** 使用本品时, 为减少事故、火灾等危险的发生, 请遵守以下事项。

 **禁止烟火**

氧气具有让燃烧物体火力增强的助燃特性。使用时请离火源（火炉，烟火等）保持2m以上的距离。

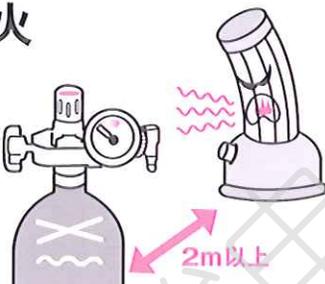

 **禁止油脂类**

请不要用带有油或油脂的手触摸氧气瓶, 也不要让氧气瓶上附有油或油脂。



 **注意换气**

确认能够充分换气后再使用。




 **氧气瓶的使用注意事项**

请不要急速打开氧气瓶的阀门开关。并且不要将本品置放于40°C以上的场所。（例如：阳光直射处，取暖器附近，夏季时车内等）



 **严禁冲击**

请避免撞击。当本品落下受到强烈冲击时, 请停止使用并联系本公司有关人员。

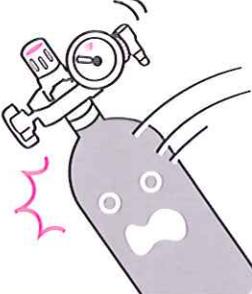

 **严禁分解, 改造**

请不要分解或改造本品。



 **使用场所的限定**

请不要携带本品进入医院的MR室（核磁共振检测室）。

 **禁止使用受损品**

在出现磨损, 裂缝的情况下, 请不要使用并立即联系本公司有关人员。



注意

使用本品时，请遵守以下事项。

连接处的松动



使用本品前，请确定连接处是否有松动。连接处的松动可能导致气体的泄漏。在漏气状态下使用的话，不仅会让氧气瓶中的氧气很快耗尽，也有可能导致重大人身事故。发现有漏气情况时，关闭氧气瓶阀门，停止使用并联系本公司有关人员。



请注意以下可能导致连接处松动的事项。

- 请不要让氧气瓶受到猛烈的冲撞。
- 携带本品步行时，请不要直接用手提携压力表。

使用·保管环境



使用，保管本品时，请避免接触酸性气体，盐分，灰尘，垃圾，雨，水等物质，以及阳光直射处，高温，结露等环境。这可能导致产生故障。

使用注意事项



使用前氧气瓶的气体余量是否充足，请确认氧气瓶调节器上的压力表。气体余量达到红色区域时，请更换充足的新氧气瓶。



使用前请确认氧气瓶的阀门是否为全开状态。在打开阀门开关时，请逆时针旋转阀门开关以听到冒气声音为止。在阀门关闭的状态下流量也不会释放。



请按照医生的流量处方使用。另外，流量刻度增大时，流量将增加。设定时务必根据流量处方调节流量刻度。



设定流量时请扭转刻度盘直到发出冒气声为止。（设置到刻度的中间位置氧气有可能无法释放）。



开关氧气瓶阀门时，或者设定流量时请不要往无效的方向强行施加过度的力气。这可能是导致故障的原因。



请将吸管插好。并确认吸管是否出现弯折，裂纹，结露等现象。



停止使用时，请将氧气瓶阀门调节到全闭状态。关闭阀门时，请顺时针扭转。阀门长时间打开保管的话，氧气余量将减少，下次再使用时有可能余量不足。

关于检查的注意事项（不遵守以下事项将可能导致故障产生）



为了本品的安全使用和维持精确度，请注意做好检查工作。否则，将不能维持正常性能，产生故障。



请不要将本品浸泡在消毒液或水中清洗。



请不要对本品进行高压蒸气灭菌。